

## בלון חמצן (5 ליטר)





## בלון חמצן (5 ליטר)

יחידה זו תעסוק בנושאים הבאים:

- בלון חמצן- למי?
- תיאור הפריט וחלקיו
- הוראות שימוש והפעלה של בלון חמצן
- נהלי השאלה
- בדיקת תקינות הפריט
- הוראות בטיחות
- ציוד נלווה



## בלון חמצן- למי?

### מטרה

- אספקת חמצן לפרק זמן קצר או לצרכי גיבוי למשתמשים במחולל חמצן


### קהל היעד

- אנשים הזקוקים לחמצן

# תיאור הפריט

## בלון חמצן (5 ליטר)

1. משקפי חמצן
2. בלון חמצן
3. שעון לחץ החמצן בבלון
4. וסת השעון
5. חלון כמות חמצן
6. נקודת חיבור משקפי החמצן
7. מהדק הווסת

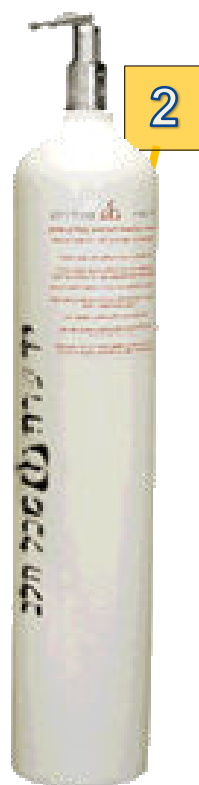

1

## הוראות שימוש/ הפעלה

1. יש לחבר את השעון לראש הבלון ע"י השחלת השעון למיקומו בראש הבלון תוך התאמת החיבור לחורים הנמצאים בצדי השעון ולסובב את ההברגה.



2. יש לחבר את משקפי החמצן לנקודת חיבור משקפי החמצן בשעון לחץ



## הוראות שימוש/ הפעלה- המשך

4. יש לפתוח את הברז בראש בלון החמצן חצי סיבוב כנגד כיוון השעון, והשעון יראה את לחץ החמצן בבלון (כשהמחוג באזור הירוק הבלון מלא, כאשר המחוג באזור האדום הבלון ריק).



5. באמצעות סיבוב ווסת הזרימה השחור ניתן לווסת את מספר הליטרים הנחוצים לדקה לפי הוראות הרופא.





## נהלי השאלה

### חשוב לזכור:

- יש למלא את מירב הפרטים על הלקוח (לפחות 2 מספר טלפון, כתובת, כתובת מייל)
- יש פיקדון על הבלון ופיקדון על השעון
- יש תשלום על מילוי החמצן
- לצורך מילוי בלון החמצן, יש להביאו לסניף יד שרה ללא השעון (טלטול הבלון עם השעון עלול לגרום לו נזק). הבלון יוחלף בבלון אחר. יש עלות למילוי כל פעם מחדש



## בדיקת תקינות הפריט

### בדיקה לפני השאלה:

- יש להרכיב שעון ולבדוק שבלון מלא ושאין דליפה

### בדיקה לאחר החזרה:

- יש לבדוק את שלמות הבלון
- יש לבדוק את שלמות השעון



## הוראות בטיחות

### חשוב לדעת:

- יש להקפיד על סגירת הבלון בתום השימוש
- אין לפתוח את ברז הבלון ללא חיבור השעון
- בפתיחת ברז הבלון אין להרכיב את הראש מעל הבלון אלא לעמוד לצידו
- יש להרחיק את הבלון ממקור חום
- אין להשתמש בבלון החמצן לאחר מגע עם חומר שומני (קרם ידיים, אוכל שומני וכדו)

## ציוד נלווה

• שעון עם ווסת (קוד: 64012)



• משקפיים לחמצן (קוד 64004 - רכישה)



• בקבוק הרטבה + מחבר שחור (קוד: 64041 - אופציה רכישה)



• בקבוק מים סטריליים (קוד: 64005 - אופציה רכישה)



• עגלה להובלת הבלון (קוד 64020)



• מתקן לבלון חמצן לכסא גלגלים (קוד 64025)

